

Ölçüler

Şimdi artık




Virtual® 380

- Ölçü maddesi

ivoclar
vivadent®

Etkileyici Ölçüler

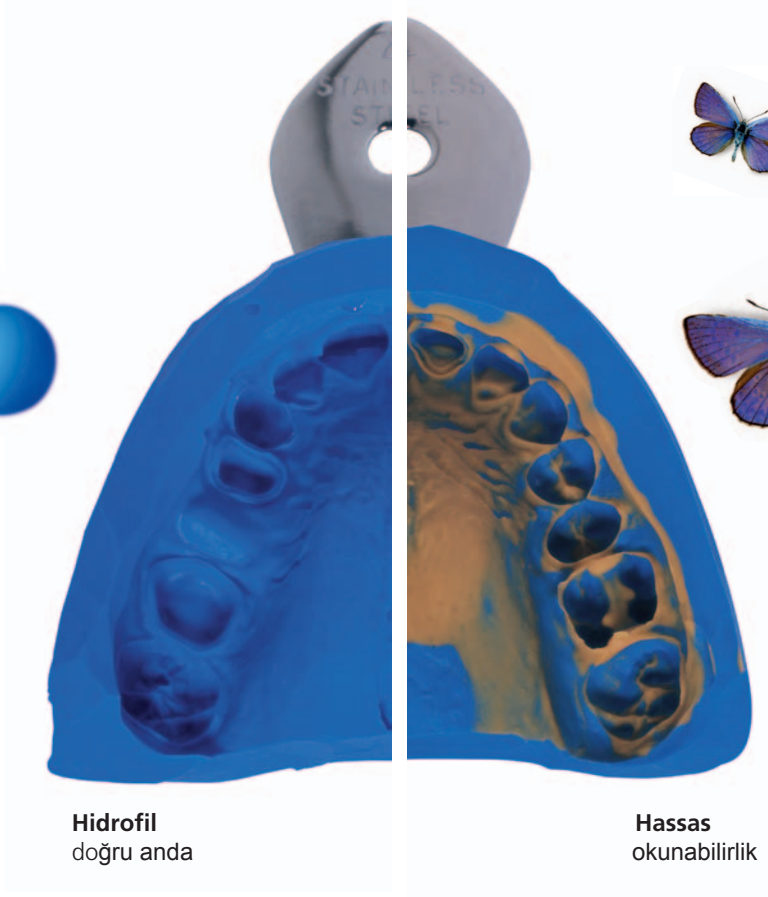

Hidrofil
doğru anda

Hassas
okunabilirlik

Virtual® 380

Hidrofil hassas - Ölçü maddesi



XXL!

Eğer karıştırma cihazı kullanıyorsanız siz de Virtual 380 XXL kartuş ile Virtual'in mükemmel kalitesinden faydalanabilirsiniz.

Virtual 380 Heavy Body

Virtual 380 Heavy Body, koyu kıvamı ve yüksek son sertliği ile çift karıştırma ölçü tekniğinde Virtual Light Body ile birlikte bir kaşık materyali olarak uygulanması idealdir.

Virtual 380 Heavy Body iki farklı çalışma ve donma süresi ile sunulmaktadır:



	Çalışma süresi	Ağızda kalma süresi
Fast:	1:15 dk.	2:30 dk.
Regular:	2:05 dk.	4:30 dk.

Virtual 380 Monophase

Orta akıcılıktaki Virtual 380 Monophase, olağanüstü esnekliği ve yüksek son sertliği ile dental implant ölçüleri, üst ölçüler ve fonksiyonel ölçüler ile optimal uyum sağlar. Üstün tiksotropik davranışının bir sonucu olarak, materyal yeterli bir basınç oluştururken, aynı zamanda primer kısımlara ve ölçü postlarına mükemmel adapte olur.



	Çalışma süresi	Ağızda kalma süresi
Fast:	1:15 dk.	3:30 dk.

Olağanüstü faydaları

Karıştırma cihazı ile birlikte XXL kartuş:

- hemen kullanıma hazır
- özel bir aktivasyon gerekmez
- aktif karıştırma işlemi sayesinde daha homojen karışım
- geniş, ekonomik paket
- karıştırılmış malzemenin çabucak hazırlanması

Yeni X-tra sunum şekli: Virtual® 380 - XXL-Kartuşlarda

X-tra pratik:



XXL-Kartuşun karıştırma cihazına konulması



Her iki materyalin eşit akışını sağlamak için karıştırma ucu olmadan materyalin homojen çıkışı



Karıştırıcıyı yerleştirin



Bajonet halkasını yerleştirin ve saat yönünde çevirerek yerine kilitleyin

Virtual, vinil polisiloksan esaslı hidrofilik bir hassas ölçü materyalidir (A-silikon).

Hem hızlı hem de normal donma süreleri ile sistem Putty, Heavy Body, Mono-phase, Light Body ve Extra Light Body'nin beş viskozite özelliği tüm popüler ölçü alım tekniklerine uygun özellikler içerir.

Heavy Body ve Monophase test edilmiş ve denenmiş el dispenserinde kullanıma uygun 50 ml kartuşlarda sunulmaya devam etmektedir.

Seçeneğe bağlı olarak şimdi Virtual 380, yeni pratik XXL kartuşlarda Pentamix*, Plug&Press Dispenser* ve MixStar* karıştırma cihazları için sunulmaktadır.

Buna ek olarak ürün Virtual serisinden yüksek son sertlik ile hızlı sertleşen Virtual kapanış kayıt materyalini kapsamaktadır. Sistem, bir kaşık adezivi ve diğer aksesuarlar ile tamamlanmaktadır.

Çok ödüllü Virtual ölçü maddesinin

Olağanüstü özellikleri:

- tam gerektiği yerde hidrofilik
- kolay okunabilirlik
- klinik endikasyona uygun
- diş hekimi ve hasta için uygulaması hoş
- her açıdan dengeli
- deneme testlerinde güvenilir



XXL-Kartuşları ile birlikte komple Virtual ürün dizisi

* Ivoclar Vivadent AG'nin tescilli markası değildir.



Paketleme şekli:

Virtual 380 Heavy Body Refill Fast Set

2 Kartuş Baz & Katalizatör her biri 380 ml

15 Karıştırıcı
2 Bajonet halkası

Refill Regular Set

2 Kartuş Baz & Katalizatör her biri 380 ml

15 Karıştırıcı
2 Bajonet halkası

Multi Pack Fast Set

6 Kartuş Baz & Katalizatör her biri 380 ml

45 Karıştırıcı
6 Bajonet halkası

Multi Pack Regular Set

6 Kartuş Baz & Katalizatör her biri 380 ml

45 Karıştırıcı
6 Bajonet halkası

Virtual 380 Monophase Refill Fast Set

2 Kartuş Baz & Katalizatör her biri 380 ml

15 Karıştırıcı

2 Bajonet halkası

Multi Pack Fast Set

6 Kartuş Baz & Katalizatör her biri 380 ml

45 Karıştırıcı
6 Bajonet halkası

Virtual 380 Zubehör Refill Bajonet halkası

2 Bajonet halkası

Refill Karıştırıcı

50 Karıştırıcı

Üretim ve Satış:
Ivoclar Vivadent AG Clinical
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent®