

Fosforikaşındırmajeli

Kullanım Kılavuzu



IFU01-2E(Rev.10)

IFU01-2K(Rev.5)

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea
vericom@vericom.co.kroverseas@vericomdental.com
www.vericom.co.kr

Telif Hakkı @VERICOM. Tüm hakları saklıdır.

Tanım

DenFil Etchant-37, doğal polimerik malzemelerle koyulaştırılmış fosforik asit formülasyonudur. DenFil Etchant-37, %37 oranında fosforik asit içerir ve yarı jel tipinde tasarlanmıştır. DenFil Etchant-37 ile kolay ve ulaşılabilir aşındırma efekti elde edilebilir. Ayrıca DenFil Etchant-37, silika ile kalınlaştırılmış asitlerin aksine aşındırılmış diş yüzeyinde kalıntı bırakmaz.

Bileşim

- Fosforik asit
- Arıtılmış su
- Yoğunlaştırıcı
- Renklendirici

Endikasyonlar

Yapışkan restorasyonlar için mine ve dentin aşındırılması.

Kontra-Endikasyonlar

Ağız mukozası, gözler ve diş pulpası dokusu dahil yumuşak dokulara uygulamayın.

Önerilen prosedür

1. Dişi izole edin ve boşluğu konservatif bir şekilde hazırlayın.
2. Kapağı çıkardıktan sonra tek kullanımlık ucu takın.
3. Mineyi ve dentini aşındırma maddesiyle 15 saniye aşındırın. Jeli iyice durulayın ve 1~2 saniye boyunca hafif bir hava akımıyla preparattaki fazla suyu giderin.

4. Kazınmış yüzeyleri temiz havayla kurulayın. Kazınmış yüzeylere tükürük üflemeyin. Kazınmış yüzey tebeşir beyazı görünmüyorsa, aşındırmayı tekrarlayın. Tükürük kontaminasyonundan kaçınılmalıdır.
5. İsterseniz 3~4 arasındaki adımları tekrarlayın.

Saklama

1. Kullandıktan sonra şırınga kapağını kapatın.
2. Yüksek sıcaklıkta veya yoğun ışıktaki saklamayın.

Tedbirler

1. Yalnızca dental kullanım içindir.
2. Bir diş hekimi veya dental profesyoneli tarafından kullanılmalıdır. Prosedüre ve önlemlere uyun.
3. Çocuklar, yaşlılar ve diğerleri dahil diş hekimliği dışındaki kullanıcıların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
4. Göz ve cilt ile temasından kaçının.
5. Cilde temas ederse derhal sabun ve suyla yıkayın.
6. Koruyucu eldiven kullanılması tavsiye edilir.
7. Kazara gözlerle veya ağız dokularıyla uzun süreli temas halinde, derhal bol miktarda suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.
8. Yutulması halinde bol miktarda su veya süt içirin, antiasit alın ve tıbbi yardım isteyin.
9. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Sembol

			
Son kullanma tarihi	Parti kodu	Kullanım talimatlarına bkz.	Katalog numarası
			
Sıcaklık limiti	Üretici	Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi	Üretim tarihi

Garanti

VERICOM CO LTD, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünü değiştirecektir. VERICOM CO LTD, açıklanan ürünün kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bununla bağlantılı tüm risk ve sorumluluğu üstlenir.



VERICOM CO.,LTD.

www.vericom.co.kr

48, Toegyegongdan 1-gil,
Chuncheon-Si,Gangwon-Do,
Korea

Tel : +82-31-441-2881 / Fax

: +82-31-441-2883

E-mail

vericom@vericom.co.kr



KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee
77, 65760 Eschbom,
Germany

**VERICOM USA,
INC.**

22541 Aspen St.
Suite A Lake
Forest, CA 92630
USA

Tel : +1-949-317-
3011

Fax : +1-949-317-
3012

Veriliş Tarihi: 27.08.2021 – IFU01-2E (Rev.10)-ETW