

DenFil Flow

İşıkla Sertleşen Radyoopak Akışkan Kompozit Resin

Kullanım Kılavuzu



IFU05E(Rev.11)

IFU05K(Rev.8)

Dental Malzemeler

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea

vericom@vericom.co.kroverseas@vericomdental.com

www.vericom.co.kr

Telif Hakkı @VERICOM. Tüm hakları saklıdır.

Tanım

DenFilFlow, ışıkla sertleşen radyoopak akışkan kompozittir.

Bileşim

- Bis-GMA/TEGDMA/UDMA/ Baryum camı/ Silika
- İnorganik dolgu maddesinin içeriği (partikül boyutu 0,01~2,5 μ m) ağırlıkça yaklaşık %60'tır.

Endikasyonlar

- Sınıf V restorasyonlar (servikal çürükler, kök erozyonu, kama şeklindeki defektler)
- Ön restorasyonlar (Sınıf III, IV)
- Küçük posterior restorasyonlar
- Azı dişleri ve küçük azı dişlerini kapatan genişlemiş çatlaklar
- Kompozit/seramik kaplamaların onarımı
- Altan kesmelerin engellenmesi.

Kontra-Endikasyonlar

DenFilFlow, ona aşırı duyarlılık geliştiren veya metakrilat monomere karşı aşırı duyarlılık öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Önerilen prosedür

1. Renk tonu seçimi

Yüzey lekelerini veya yabancı plakları gidermek için dişleri pomza ve suyla temizleyin. Dişler tek renkli değildir. Renk tonu ve restorasyon derinliğini göz önünde bulundurun. Diş izolasyonundan önce uygun rengi seçin.

2. Kavite hazırlığı

Operasyonlara müdahale eden tüm amalgam veya diğer temel malzemeleri çıkarın

3. Pulpa koruması

Derin kavitelerde, pulpaya yakın dentini minimum miktarda kalsiyum hidroksit astar ile kaplayın ve kavite yüzeyinin geri kalanını serbest bağlanmadan bırakın. İstenirse cam iyonomer veya diğer öjenol içermeyen baz malzemeler kullanılabilir.

4. Mine ve dentin tedavisi

Aşındırma, astarlama, yapıştırıcı uygulaması ve sertleştirmeyle ilgili üreticinin talimatlarını izleyin.

5. Dağıtma

Kapağı çıkardıktan sonra tek kullanımlık ucu şırınganın üzerine yerleştirin. Resini uygulamadan önce iğne ucunun tıkanmadığından emin olun. Tıkanmışsa, ucu çıkarın ve az miktarda resinidoğrudan şırınganın luerinden sıkın. Varsa görünür tıkaçları şırıngadan çıkarın. Yeni tek kullanımlık ucu değiştirin ve resiniyeniden eksprese edin. DenFilFlow, bir dağıtım kabının üzerine ekstrüde edilebilir ve bir fırça veya başka aletlerle uygulanabilir.

6. Yerleştirme

Reçini 2,0 mm veya daha az düzeylerde artışlarla yerleştirin. Sızıntıyı önlemek için dağıtım işleminden sonra şırınga pistonunu geri çekin.

7. Sertleştirme

Restorasyon yüzeyinin her alanını yüksek yoğunluklu görünür ışık kaynağına maruz bırakın. Işık kılavuzunun ucunu pozlama sırasında restoratife mümkün olduğunca yakın tutun. Standart bir ışıkla sertleştirme ünitesiyle 20 saniye süreyle ışıkla sertleştirin. (Işıkla sertleştirme ünitesinin çıkışı, sertleştirme radyometresi ile ölçüldüğü üzere 400 mW/cm²'nin altındaysa, daha fazla zamana ihtiyaç duyulabilir.)

8. Bitirme

Geleneksel teknikleri kullanarak bitirin ve cilalayın.

Saklama

1. Yüksek sıcaklıkta veya yoğun ışıkta saklamayın.
2. Serin bir yerde saklayın.
3. Öjenol içeren malzemenin yakınında malzemeleri saklamayın.
4. DenFilFlow kullanıldıktan sonra hemen kapatılmalıdır.

Tedbirler

1. Yalnızca dental kullanım içindir.
2. Bir diş hekimi veya dental profesyoneli tarafından kullanılmalıdır. Prosedüre ve önlemlere uyun.
3. Çocuklar, yaşlılar ve diğerleri dahil diş hekimliği dışındaki kullanıcıların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
4. Ciltte hassasiyet veya akrilat alerjisi meydana gelirse resin kullanmayı bırakın.
5. Sertleşmemiş resin maruz kalmaktan kaçınılmalıdır, eğer resincilde temas ederse hemen sabun ve suyla yıkayın.
6. Kazara gözlerle temas veya ağız dokularıyla uzun süreli temas meydana gelirse, derhal bol miktarda suyla yıkayın.
7. Koruyucu eldiven kullanılması ve dokunmadan teknik kullanılması tavsiye edilir.
8. Kullanmadan önce solunum yolu için koruyucu cihazın kullanılması önemle tavsiye edilir.
9. Soğutulmuşsa, kullanımdan önce malzemenin oda sıcaklığına gelmesine izin verilmelidir.
10. Polimerizasyon olmaması durumunda, ışıkla sertleştirme ünitesinin ışık yoğunluğunu kontrol edin ve ardından aynı kaliteyle ilgili konularla ilgili olarak en yakın bayi/satıcılar veya üreticiyle doğrudan iletişime geçin.
11. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Sembol

			
Son kullanma tarihi	Parti kodu	Kullanım talimatlarına bkz.	Katalog numarası
			
Sıcaklık limiti	Üretici	Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi	Üretim tarihi

Garanti

VERICOM CO LTD, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünü değiştirecektir. VERICOM CO LTD, açıklanan ürünün kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bununla bağlantılı tüm risk ve sorumluluğu üstlenir.



VERICOM CO.,LTD.

www.vericom.co.kr

48, Toegyegongdan 1-gil,



KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee

77, 65760 Eschbom,

VERICOM USA,

INC.

22541 Aspen St.

Chuncheon-Si,Gangwon-Do,
Korea

Tel : +82-31-441-2881 / Fax

: +82-31-441-2883

E-mail

vericom@vericom.co.kr

Germany

Suite A Lake
Forest, CA 92630

USA

Tel : +1-949-317-
3011

Fax : +1-949-317-
3012

Veriliş Tarihi: 27.08.2021 -. IFU05E(Rev.11)-ETW