

Eco-S

Opak Resin-bazlı Pit ve Fissür Örtücü



Tanım

Eco-S, tek bileşenli, ışıkla sertleşen, beyaz renkte Pit ve fissür örtücüdür. Metakrilat resin kimyasına dayanmaktadır. Pit ve fissür örtücü olarak kullanılabilir.

Bileşim

- Bisfenol A glisidildimetakrilat
- Trietilenglikol dimetakrilat
- Füme silika
- Fotoğraf başlatıcı
- Renklendirici

Endikasyonlar

Çürüklerin önlenmesi için dişlerdeki emaye çukurlarının ve çatlaklarının kapatılması

Kontrendikasyonlar

Eco-S'yi bu ürüne karşı iltihabı veya alerjisi olan bir hastada kullanmayın.

Önerilen prosedür

1. Plak ve kalıntıları gidermek için dişleri yağsız pomza ve suyla temizleyin.
2. Lastik örtü veya Pamuklu rulo yerleştirerek dişleri tükürük kirliliğinden izole edin. Mümkünse tükürük püskürtme cihazı veya yüksek hacimli tahliye kullanın.
3. Üreticinin talimatlarına göre dişlere uygun aşındırma ajanını uygulayın. Aşındırıcıyı uyguladıktan sonra dişlerinizi suyla iyice durulayın ve fazla suyu çıkarın.
4. Kazınmış yüzeyleri temiz havayla kurutun. Kazınmış yüzeylere tükürük veya nem bulaşmasından kaçının. Aşındırılmış yüzeylerde tebeşir beyazı görünmüyorsa aşındırma prosedürünü tekrarlayın.
5. Tek kullanımlık bir uç kullanarak Eco-S'yi dişlere uygulayın. Sızdırmazlık maddesini bir eksploratör ile karıştırmak olası kabarcıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.
6. Işık kaynağı (420-500nm) kullanarak yüzeyini 20 saniye sertleştirin. Işık kılavuzunun ucunu izolasyon malzemesine 1mm'nin altında mümkün olduğu kadar yakın tutun ve ardından tıkanmayı kontrol edin.
7. Sertleşmemiş dolguyu alkollü sünger veya pamuklu aplikatörle çıkarın.

Saklama

1. Yüksek sıcaklıkta veya yoğun ışıktaki saklamayın.
2. Öjenol içeren malzemenin yakınında saklamayın.
3. Eco-S kullanıldıktan sonra hemen kapatılmalıdır

Tedbirler

1. Yalnızca dental kullanım içindir.
2. Bir diş hekimi veya dental profesyoneli tarafından kullanılmalıdır. Prosedüre ve önlemlere uyun.
3. Çocuklar, yaşlılar ve diğerleri dahil diş hekimliği dışındaki kullanıcıların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
4. Göz ve cilt ile temasından kaçının.
5. Akrilik reçise karşı aşırı duyarlılığı ve alerjik reaksiyonu olan hastalarda kullanmayınız.
6. Buzdolabında saklıyorsanız, kullanmadan önce Eco-S'nin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
7. Polimerizasyon olmaması durumunda, ışıkla sertleştirme ünitesinin ışık yoğunluğunu kontrol edin ve ardından aynı kaliteyle ilgili konularla ilgili olarak en yakın bayi/satıcılar veya üreticiyle doğrudan iletişime geçin.
8. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
9. Sertleşmemiş resine maruz kalmamaya dikkat edin. Resin cilde temas ederse derhal sabun ve suyla yıkayın.
10. Koruyucu eldiven kullanılması tavsiye edilir.

11. Kazara gözlerle temas ederse veya ağız dokusuyla uzun süreli temas meydana gelirse, derhal bol miktarda suyla yıkayın.
12. Örtücü, ortam ışığı ile sertleştirilebilir. İstenmeyen sertleşmeyi önlemek için baş üstü ameliyathane ışıklarına dikkat edin.

Sembol



Son kullanma tarihi



Parti kodu



Kullanım talimatlarına bkz.



Katalog numarası



Sıcaklık limiti



Üretici



Üretim tarihi



Avrupa Topluluğu Yetkili
Temsilcisi

Garanti

VERICOM CO LTD, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünü değiştirecektir. VERICOM CO LTD, açıklanan ürünün kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bununla bağlantılı tüm risk ve sorumluluğu üstlenir.



VERICOM CO.,LTD.

www.vericom.co.kr

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea

Tel : +82-31-441-2881 / Fax : +82-31-441-2883

vericom@vericom.co.kr /

overseas@vericomdental.com



KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, 65760
Eschbom, Germany

VERICOM USA, INC.

22541 Aspen St. Suite A Lake
Forest, CA 92630 USA
Tel : +1-949-317-3011
Fax : +1-949-317-3012

Veriliş Tarihi: 27.08.2021 –IFU03E(Rev.7)-JHS