

Well-Paste

Baryum Sülfatlı Kalsiyum Hidroksit



Tanım

Well-Paste, pulpa kaplama ve enfekte kök kanalı için geçici bir kök kanalı dolgu malzemesidir. Ayrıca iyi bir kanal içi ilaç da uygulanır. Temel olarak Kalsiyum Hidroksit ve Baryum Sülfat içerir, iyi radyopasite ve antibakteriyel özelliklere sahiptir (pH > 12). Well-Paste herhangi bir katılaşma veya ayrılma olmaksızın oldukça stabildir ve uygun bir şırıngada önceden karıştırılmış akıcı bir macundur. Ayrıca Well-Paste'in apekse mükemmel erişimi ve periapikal dokuyla biyouyumluluğu vardır.

Bileşim

- | | |
|----------------------|--------------------|
| - Kalsiyum Hidroksit | - Baryum Sülfat |
| - Kıvam Arttırıcı | - Glikol Türevleri |
| - Su | |

Kullanım amacı

Endodontik tedavi sırasında kök kanalını geçici olarak doldurmak için.

Kontrendikasyonlar

Kalıcı dolgu malzemesi veya yapıştırma malzemesi olarak uygulamayın.

Endikasyonlar


1. Enfekte olmuş kök kanalının tedavisi
2. Açığa çıkan pulpanın pulpa ile kapatılması
3. Kağıt hamuru çıkarma işleminden sonra dezenfeksiyon
4. Vital pulpotominin pulpa kaplaması

Yan etkiler

Well-Paste apeksin ötesine kadar doldurulduğunda iltihaplanmaya, doku nekrozuna ve sinir hasarına neden olabilir

Önerilen prosedür

1. Kök kanalının hazırlanmasından sonra kanalı nazikçe durulayın ve kurulayın.
2. Size kolaylık sağlamak için, şırıngaya aşağıdaki resimde olduğu gibi serbest açılı bir tutucu sabitleyin.

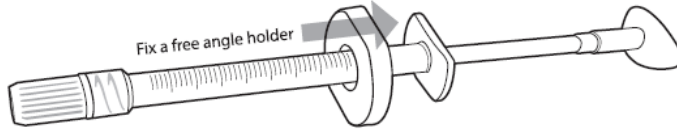

3. Şırınganın ucunu kök kanalına yerleştirin.
4. Pistonu yavaşça ve düzgün bir şekilde bastırarak macunu uygulayın.
5. Macun kanalı tamamen doldurduğunda şırıngayı yavaşça geri çekin.
6. Yüzeydeki fazla macunu çıkarın.
7. Son doldurma işleminden önce Well-Paste'in tamamen çıkarılması gerekir. Well-Paste'in çıkarılması uygun irigasyon solüsyonu ve aleti kullanılarak gerçekleştirilir.
8. Şırınganın tek kullanımlık ucunu çıkarın, kapağını sıkıca kapatın ve serin bir yerde saklayın.

Saklama

1. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının.
2. Serin bir yerde saklayın.

Tedbirler

1. Yalnızca dental kullanım içindir.
2. Bir diş hekimi veya dental profesyoneli tarafından kullanılmalıdır. Prosedüre ve önlemlere uyun.
3. Çocuklar, yaşlılar ve diğerleri dahil diş hekimliği dışındaki kullanıcıların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
4. Macunu aşırı kuvvetle bastırmayın, hastada bir miktar akut ağrı olabilir.
5. Apeksin ötesinde aşırı doldurmayın.
6. Cilt, göz ve mukoza ile temasından kaçının. Kalsiyum hidroksitin cilt, göz ve mukoza ile teması lokal tahrişe ve yanıklara neden olabilir. Yanlışlıkla temas halinde bol miktarda suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
7. Well-Paste'i kullanmadığınızda lütfen şırınga kapağını sıkı tutun.
8. Tek kullanımlık ucu kullandıktan sonra tekrar kullanmayın.
9. Dahiliye ilacı olarak kullanmayınız.
10. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
11. Tedavi malzemelerine aşırı duyarlılık veya alerji gösteren hastalarda kullanmayınız.
12. Macun sertleşmişse, faz ayrımı olmuşsa veya yabancı maddeler varsa kullanmayın.

Sembol



Son kullanma tarihi



Parti kodu



Kullanım talimatlarına bkz.



Katalog numarası



Sıcaklık limiti



Üretici



Üretim tarihi



Avrupa Topluluğu Yetkili
Temsilcisi

Garanti

VERICOM CO LTD, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünü değiştirecektir. VERICOM CO LTD, açıklanan ürünün kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bununla bağlantılı tüm risk ve sorumluluğu üstlenir.



VERICOM CO.,LTD.

www.vericom.co.kr

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea

Tel : +82-31-441-2881 / Fax : +82-31-441-2883

vericom@vericom.co.kr /

overseas@vericomdental.com



KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, 65760

Eschbom, Germany

Veriliş Tarihi: 12.08.2022 – IFUEN02E(Rev.10)-YHC