

Well-Prep

EDTA Kök Kanal Hazırlama Kremi

- Temizleyici, Endodontik, Kök Kanalı



Tanım

Etilendiamin Tetraasetik Asit (EDTA) içeren Well-Prep, kök kanalının etkili bir şekilde temizlenmesini ve daha kolay hazırlanmasını sağlayan bir şelatör ajanıdır. Well-Prep'teki Üre-peroksit sodyum hipoklorit ile reaksiyona girdiğinde, kabarcıklanma etkisiyle pulpa artıkları kanaldan dışarı çıkarılır. Well-Prep, dentin tübülleri açıldıkça endodontik ilaçların ve dolgu malzemelerinin tübüler penetrasyonunu artırır.

Well-Prep ayrıca özel bir kayganlaştırıcı ekleyerek kök kanallarına enjeksiyonun verimliliğini artırır.

Bileşim

- Etilendiamin Tetraasetik Asit (EDTA) %15
- Üre Peroksit %10
- PPG ve PEG

Endikasyonlar

1. Kök kanalının kolay şekillendirilmesi ve temizlenmesi.
2. Enkazın kolay ve hızlı bir şekilde çıkarılması.
3. Dentin dekalsifikasyonunun teşvik edilmesi.
4. Kayganlaştırıcı etkisi nedeniyle kanallardaki aletlerin kolay kullanımı.

Önerilen prosedür

1. Dişi bir lastik örtü ile izole edin ve pulpa haznesini açın.
2. Pulpa haznesine uygun miktarda Well-Prep enjekte edin veya Well-Prep'i doğrudan eğenin üzerine yerleştirin.
3. Kanalı geleneksel şekilde eğeleyn ve genişletin.
4. İhtiyaç duyarsanız yukarıdaki adımı yeniden uygulayın.
5. Sodyum hipoklorit ile kök kanalını temizleyin.

Saklama

1. Well-Prep'i kullanmadığınız zamanlarda performansını korumak için Well-Prep'i buzdolabında saklayın.
2. Well-Prep'i donmaması için dondurucuda saklamayınız.
3. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınınız.

Tedbirler

1. Yalnızca dental kullanım içindir.
2. Bir diş hekimi veya dental profesyoneli tarafından kullanılmalıdır. Prosedüre ve önlemlere uyun.
3. Çocuklar, yaşlılar ve diğerleri dahil diş hekimliği dışındaki kullanıcıların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
4. Well-Prep'in apekten dışarı taşmasını önleyin.
5. Kök kanalında delik kalmayacak şekilde dikkatlice uygulayın.
6. Kullandıktan sonra daima kapağını sıkıca kapatın ve oda sıcaklığında saklayın.
7. Koruyucu eldiven kullanılması tavsiye edilir.
8. Kazara gözlerle veya uzun süreli ağız dokularıyla temas halinde, derhal bol miktarda suyla yıkayın.
9. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
10. Bu ürünü, ürünün içeriğindeki maddelere alerjisi olduğu bilinen hastalarda kullanmayınız.

Sembol



Son kullanma tarihi



Parti kodu



Kullanım talimatlarına bkz.



Katalog numarası



Sıcaklık limiti



Üretici



Üretim tarihi



Avrupa Topluluğu Yetkili
Temsilcisi

Garanti

VERICOM CO LTD, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünü değiştirecektir. VERICOM CO LTD, açıklanan ürünün kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bununla bağlantılı tüm risk ve sorumluluğu üstlenir.



VERICOM CO.,LTD.

www.vericom.co.kr

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea

Tel : +82-31-441-2881 / Fax : +82-31-441-2883

vericom@vericom.co.kr /

overseas@vericomdental.com



KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, 65760

Eschbom, Germany

VERICOM USA, INC.

22541 Aspen St. Suite A Lake

Forest, CA 92630 USA

Tel : +1-949-317-3011

Fax : +1-949-317-3012

Veriliş Tarihi: 27.08.2021 –IFUEN01E(Rev.8)-SJY