

Dual CoreAutomixtype

Dual (hem kendiliğinden hem de ışıkla sertleşen) kor yapı kompozit



Tanım

Dual Core, dual (hem kendiliğinden hem de ışıkla sertleşen) (ışık+kimyasal), radyoopak bileşiklerdir. Diş çürüğü ve kor yapının yerine kullanılır. Dual Core'un kartuş ve şırınga tipi olmak üzere iki türü vardır. Üç çeşit rengi vardır (Beyaz, Mavi, Doğal(A3)). Ağız içi uç takılarak tedavi bölgelerine uygulanması kolaylaşabilmektedir.

Bileşim

- Baryum alüminosilikat (Ortalama Parçacık Boyutu: $\leq 0,3\mu\text{m}$)
- Silika - Bis-GMA
- TEGDMA - Katkı Maddeleri
- Toplam inorganik dolgu maddesinin ağırlıkça yüzdesi ca. %65

Endikasyonlar

Kor yapı

Önerilen prosedür

1. Tedavi alanını izole etmek için neme dayanıklı yöntemi kullanın.
2. Mevcut tüm çürümleri veya kalıntıları giderin.
3. Minimum miktarda Kalsiyum Hidroksit kullanarak açığa çıkan pulpayı veya pulpaya yakın kavitenin alt kısmını koruyun.
4. Üreticinin kılavuzuna göre dişlere asitleyici, astar ve yapıştırıcı uygulayın. Bağlayıcı madde kullanıldığında (5, 6, 7. nesil bağlama maddesi), ayrıca Aktivatör (Çapraz bağlantı) tavsiye edilir.
5. İstenilen kartuş veya şırınga rengini seçin ve karıştırma ucunu ve ağız içi ucu sırayla takın. Daha sonra tedavi alanına uygulayın. Çalışma süresi yaklaşık 30 saniyedir.
 - Kartuş tipini kullanırken dağıtım tabancası kullanın.
 - Kartuşun veya şırınganın her iki yanından eşit akış sağlamak için karıştırma ucunu takmadan önce az miktarda malzeme dağıtın.
6. Bir ışık kaynağı (420-500nm) kullanarak 40 saniye sertleştirin. Işık ünitesinin ucunu Dual Core 1 mm'nin altında mümkün olduğunca yakın dikey olarak tutun ve tıkanıklığı kontrol edin.
 - Işıkla sertleşme olmadığı takdirde ağızda 4 dakikada kimyasal sertleşme gerçekleşir. Düşük sıcaklıklarda ayar süresi uzayabilir (ön bölgede).
7. Yüzeyin sertliğini bir eksploratörle kontrol edin ve bir sonraki adıma geçin.

Saklama

1. Yüksek sıcaklıkta veya yoğun ışıktaki saklamayın.
2. Kuru ve serin bir yerde (2-24 °C) saklayınız.
3. Kullandıktan sonra kartuş kapağını kapatın ve oda sıcaklığında saklayın. Uzun süre kullanılmıyacaksa buzdolabında saklayın.
4. Öjenol içeren malzemenin yakınında saklamayın.

Tedbirler

1. Yalnızca dental kullanım içindir.
2. Bir diş hekimi veya dental profesyoneli tarafından kullanılmalıdır. Prosedüre ve önlemlere uyun.
3. Çocuklar, yaşlılar ve diğerleri dahil diş hekimliği dışındaki kullanıcıların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
4. Kullanmadan önce aşırı duyarlılığı ve alerjik reaksiyonu olan hastalarda kullanmayınız.
5. Soğutulmuşsa, kullanımdan önce malzemenin oda sıcaklığına gelmesine izin verilmelidir.
6. Polimerizasyon olmaması durumunda, ışıkla sertleştirme ünitesinin ışık yoğunluğunu kontrol edin ve ardından aynı kaliteyle ilgili konularla ilgili olarak en yakın bayi(ler) veya üreticiyle doğrudan iletişime geçin.
7. Öjenol içeren malzemelerle kullanmayınız.
8. Sertleşmemiş resine maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Resinin cilde temas etmesi durumunda derhal alkolle çıkarın.
9. Kazara gözlerle temas veya ağız dokusuyla uzun süreli temas meydana gelirse, derhal bol miktarda suyla yıkayın
10. Koruyucu eldiven kullanılması ve dokunmadan teknik kullanılması tavsiye edilir.
11. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Sembol



Son kullanma tarihi

LOT


Parti kodu



Kullanım talimatlarına bkz.

REF

Katalog numarası

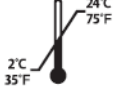

Sıcaklık limiti



Üretici



Üretim tarihi



Avrupa Topluluğu Yetkili
Temsilcisi

Garanti

VERICOM CO LTD, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünü değiştirecektir. VERICOM CO LTD, açıklanan ürünün kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmez. Kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bununla bağlantılı tüm risk ve sorumluluğu üstlenir.



VERICOM CO.,LTD.

www.vericom.co.kr

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea

Tel : +82-31-441-2881 / Fax : +82-31-441-2883

vericom@vericom.co.kr / overseas@vericomdental.com



KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, 65760 Eschbom,
Germany

VERICOM USA, INC.

22541 Aspen St. Suite A Lake Forest, CA

92630 USA

Tel : +1-949-317-3011

Fax : +1-949-317-3012

Veriliş Tarihi: 27.08.2021 - IFU07-2E(Rev.10)-ETW